

**NO DEIXIS
ENRERA
EL FUTUR**




c/ Consell de
Cent 146.
☎ 932894248
☎ 934266052
08015 Barcelona
kitdental@yahoo.es

Estructures de **ZIRCONI**

Amb Kit Dental tindrà la possibilitat d'accedir al nou metall ceràmic més innovador, l'òxid de **zirconi**, fressat mitjançant la tecnologia CAD/CAM.



No haurà d'efectuar cap inversió addicional, tenint sempre al seu abast els últims avenços tecnològics.

Estètica inigualable.
Translucidesa molt més similar a la dent natural.
Resistència contrastada, inclòs per a ponts posteriors.
Metall neutra, biocompatible.
Ajustatge òptim.

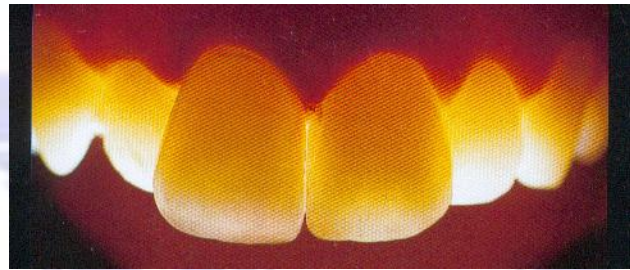


Talla

No és necessària una preparació de colls, al contrari que en d'altres restauracions en ceràmiques completes tradicionals, ni per a suportar l'estructura, ni per raons estètiques. És més, els marges poden bissellar-se. Per això la preparació necessària per una restauració amb **zirconi** és més conservadora, preservant el teixit dental.

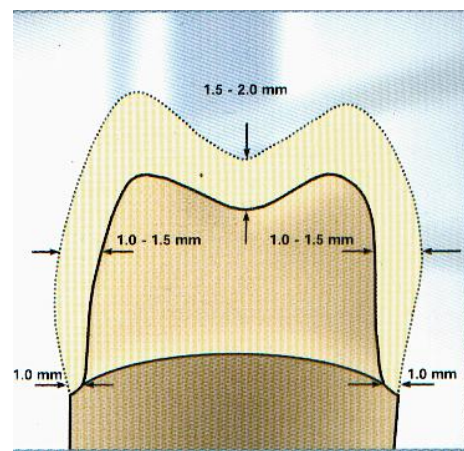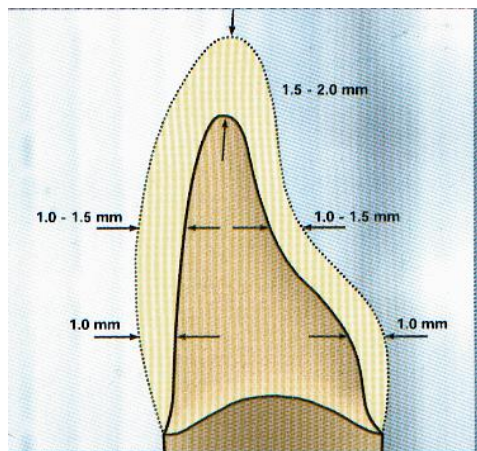





Preparació ideal:
xamfer allargat i angles
recomanats

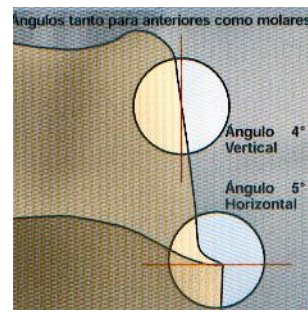


Contraindicacions

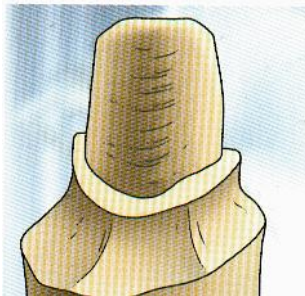

Coll de 90 graus

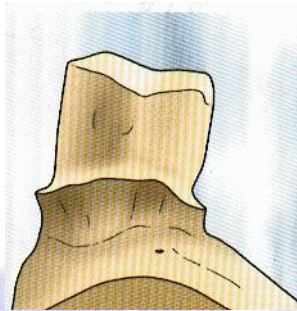

Soscavat

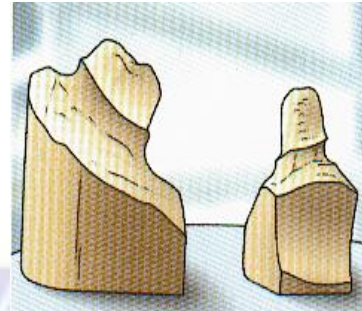

Monyons divergents

Imatges de ponts






El **Zirconi** permet estructures grans, sempre que les connexions siguin adequades.



Eliminació dels colls
Grisos produïts per el metall

Imatges d'implants

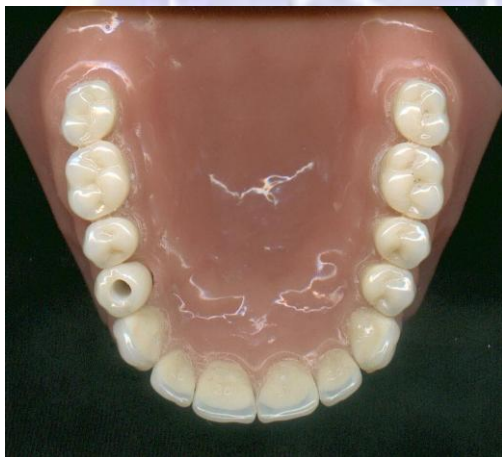

La presa de color es farà amb Vita "Lumin Vacum"
Els terminis d'entrega són 10 dies.
El torque màxim serà de 35N.



Es cimenta amb qualsevol tipus de ciment fosfàtic o hionomer de vidra

